

GETINGE CLEAN

Ürün Spesifikasyonu

Heavy Soil Detergent

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tıbbi cihazlardaki ağır cerrahi toprakların temizlenmesinde kullanılan yıkayıcı dezenfektörlerde kullanılan yüksek alkalili bir deterjandır. Paslanmaz çelik, seramik, cam ve dirençli plastik gibi alkaliye dirençli yüzeylerde kullanılmaya uygundur.

KULLANIM TALİMATLARI

Dozaj aralığı 3-8 ml/lit.

Temizleme sıcaklığı aralığı 40-80 °C.

Getinge Clean Nötrleştirici ile bir de nötralizasyon adımı uygulanmalıdır

Alüminyum ya da polikarbonat malzemelerde kullanmayın.

Kullanmadan önce malzeme uyumluluğunu kontrol edin.

Kullandıktan sonra iyice durulayın.

Başka kimyasallarla karıştırmayın.

İÇİNDEKİLER

Potasyum Hidroksit, Ayırt Edici Ajanlar, Sürfaktanlar ve Korozyon Önleyiciler.

TEKNİK VERİLER

Özgül ağırlık (20°C'de): 1,3 (tipik)

sunulduğu pH değeri (tipik): 13.5

pH (5ml/lit suda) (tipik): 12.6

Viskozite (konsantrat, 20 °C): < 50 cps

MUHAFAZA BİLGİLERİ

Donmaya, asitlere ve güçlü oksitleyici ajanlara karşı korunan serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.

Kendi kaplarında dik konumda muhafaza edin.

En uygun muhafaza sıcaklığı 5-25°C arasındır.

GÜVENLİK VE KULLANIM

Malzeme Güvenlik Veri Sayfası.

CE İŞARETİ

Heavy Soil Detergent, tıbbi cihazlar hakkında AB Direktifi 93/42/EC, Ek 1 talimatlarına uygundur.

ÇEVRESEL DUYARLILIK

Biyoçözünür formülasyon ve geri dönüştürülebilir ambalajlama.



Cihazlar

Deterjan



Getinge deterjan ürünleri, Getinge yıkayıcılarında test edilmiş ve ISO 15883 tıbbi cihaz temizliği verimlilik standartlarına uygun bulunmuştur.




GETINGE CLEAN

Ürün Spesifikasyonu

Heavy Soil Detergent

SU SERTLİĞİ VE DETERJAN DOZAJI

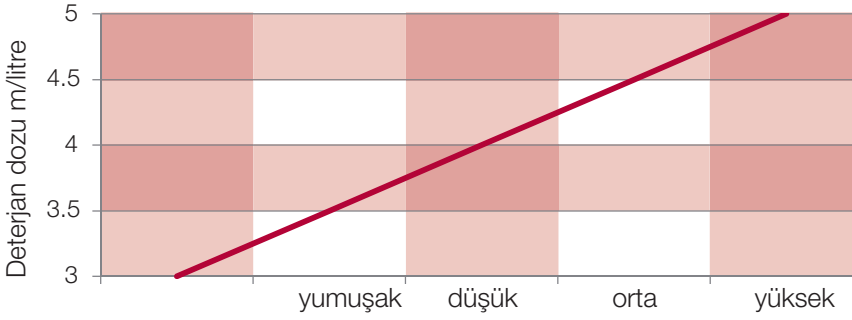

Not:

Su sertliği, dozajlanacak deterjan miktarını etkileyen faktörlerden sadece biridir.

Dahil edilebilecek diğer faktörler:

- Temizleme döngüsünün süresi
- Sıcaklık
- Toprak türü, miktarı ve durumu (kuru olması gibi)
- Malzeme uyumluluğu

SERVİS

Uygun deterjan dozajı ve temizleme proseslerinin optimize edilmesi hakkında teknik destek almak için Getinge temsilcinizle görüşün.

GETINGE ELDE ve OTOMATİK YIKAMA DETERJANI ÜRÜNLERİ



| | Alüminyum | Anotlanmış alüminyum | Titanyum | Demir içermeyen metaller | Mat krom kaplı | Paslanmaz çelik | Cam | Seramik | Kauçuk | Plastik |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------------------|----------------|-----------------|-----|---------|--------|---------|
| ■ GETINGE CLEAN AĞIR TOPRAK DETERJANI | | | M | | ● | ● | ● | ● | ● | M |
| ■ GETINGE CLEAN ÜNİVERSAL DETERJAN | M | M | M | M | ● | ● | ● | ● | ● | M |
| ■ GETINGE CLEAN ENZİMATİK DETERJAN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M |
| ■ GETINGE CLEAN NÖTRLEŞTİRİCİ | M | M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M | M |
| ■ GETINGE CLEAN DURULAMA YARDIMCISI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | M | M |
| ■ GETINGE CLEAN CİHAZ YAĞLAMA YAĞI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| ■ GETINGE CLEAN ÖN İŞLEM KÖPÜĞÜ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Bu şema sadece bir rehber niteliğindedir ve üretici tarafından tıbbi cihazların yeniden işlenmesine yönelik verilen EN ISO 17664 talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
M=Her zaman cihaz üreticisinin talimatlarına başvurun.

SİPARİŞ NO.

| 5 l | 10 l | 25 l | 205 l |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 503436610 | 503436710 | 503436810 | 503436910 |

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11
Box 1505, SE-351 15 Växjö, İsveç
Telefon: +46 (0)10 335 98 00
Web: <http://www.getinge.com>
E-posta: info@getinge.com