

Getinge Clean

Enzymatic Detergent

Yıkayıcı dezenfektörlerde, ultrasonik banyolarda ve elle tıbbi cihaz temizlemede kullanılan nötr enzymatic detergent. Paslanmaz çelik, seramik, cam, plastik ve yumuşak metaller gibi suya dayanıklı yüzeyler için uygundur.



Kullanım talimatları

- Dozaj aralığı 2–10 ml/l
- Temizleme sıcaklığı (makine) 35–60 °C
- Temizleme sıcaklığı (manuel) 30–45 °C
- Temizleme sıcaklığı (ultrasonik) 30–45 °C
- Kullandıktan sonra tamamen durulandığından emin olun

Dikkat edilecek noktalar

- Polikarbonat malzemede kullanmayın
- Kullanmadan önce uyumluluk açısından kontrol edin
- Başka kimyasallarla karıştırmayın
- Her zaman doğru koruyucu ekipmanları giyin.

Semboller



Tüm malzemeler



Deterjan

Teknik veriler

Özgül ağırlık (20°C'de):	1,047 (tipik)
Sunulduğu pH değeri (tipik):	7.9
5ml/l sudaki pH (tipik):	7.7
Viskozite (konsantrat, 20 °C):	3,8 cSt

İçindekiler

Proteaz, lipaz, amilaz enzimleri, sürfaktanlar, ayırt edici ajanlar ve korozyon inhibitörleri.

Saklama bilgileri

Donmaya, asitlere ve güçlü oksitleyici ajanlara karşı korunan serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Orijinal kaplarda dikey bir şekilde saklayın. En uygun muhafaza sıcaklığı 5-25 °C arasındadır. Kullanım ömrü: orijinal, kapalı kaplarda 24 ay.

Güvenlik ve kullanım

Güvenlik Veri Sayfasına başvurun.

CE İşareti

Mevcut Avrupa tıbbi cihazlar mevzuat gerekliliklerine göre CE işaretlidir.

Servis

Uygun deterjan kullanımına ilişkin teknik destek için, lütfen yerel Getinge temsilciniz ile irtibata geçin.

Çevresel farkındalık

Biyoçözünür formülasyon ve geri dönüştürülebilir ambalajlama.

Sipariş numarası

Boyut (u)	Dil	Sipariş numarası	Comments
5	en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, tr, ru, zh, el, cs, pl	503437031	
10	sv, da, no, it	503437131	
10	de, tr, cs, pl	503437132	
10	fr, nl, es, pt	503437133	
10	en, ru, zh, el	503437134	
25	sv, da, no, it	503437231	
25	de, tr, cs, pl	503437232	
25	fr, nl, es, pt	503437233	
25	en, ru, zh, el	503437234	
205	en, sv, da, no, fr, de, nl, es, it, pt, tr, ru, zh, el, cs, pl	503437331	

Malzeme uyumluluđu

Her zaman ürün ve alet üreticisinin temizlik talimatlarına uyun ve kullanmadan önce malzemenin uyumluluđunu kontrol edin. Aşağıdaki çizelge yalnızca bir rehber olarak hizmet vermektedir.

	Alüminio	Alüminio anodizado	Titânio	Metais não ferrosos	Cromo mate	Aço inoxidável	Vidro	Cerâmica	Borracha	Plástico
Getinge Clean Universal Detergent	M	M	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	M
Getinge Clean Instrument Lubricant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Getinge Clean Instrument Lubricant Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Getinge Clean Pre Treatment Foam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getinge Clean Enzymatic Detergent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M
Getinge Clean Manual Plus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getinge Clean MIS Detergent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getinge Clean Prion Detergent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getinge Clean Heavy Soil Detergent	-	-	M	-	✓	✓	✓	✓	✓	M
Getinge Clean Rinse Aid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	M
Getinge Clean Chamber Foam	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Getinge Clean Neutralizer	M	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M	M
Getinge Clean Neutralizer Plus	-	-	M	M	M	✓	✓	M	M	M

006070

✓ = Ürün malzemeye uygundur

- = Ürün malzemeye uygun değildir

M = Alet/parça üreticisinin talimatlarına özellikle dikkat edin