

BIYOLOJİK İNDİKATÖRLERDE HER KULLANIMDA KONTROL KULLANMAYA GEREK VARMIDIR ?

Biyolojik indikatörlerin miadları üretim tarihinden itibaren iki yıldır.Saklama koşulların iyi olmaması durumunda mikroorganizma popülasyonu raf ömründen önce azalabilir. Dolayısıyla her yeni ürüne başlarken rutin kontrol testi dışında, sizin belirleyeceğiniz zaman aralıklarında(haftada 1--- 15 günde 1)kontrol testi yapılmalıdır.

Bunun dışında özellikle strip şeklinde olan biyolojik indikatörlere, laboratuvar ortamında ekim yapılır .Çapraz kontaminasyon olabilir. Test ve kontrol için kullanılan mikroorganizmaların üreme şekillerine bakılarak karşılaştırma yapılır.

Ramazan ATASEVER